


Apsauginių kaukių dėvėjimo taisyklės

Tinkamas kaukių dėvėjimas užtikrina efektyvią kenksmingų dalelių filtraciją

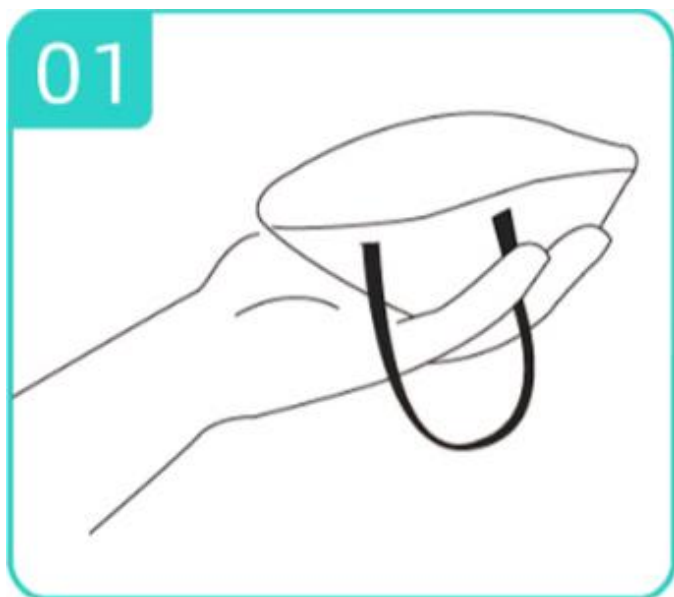

1. Pasukite kaukę, nukreiptą nosies spaustuku žemyn ir nuleiskite ausų laikiklius kaip parodyta.

2. Pakiškite N95 kaukę po smakru, uždėkite spaustuko sritį ant nosies





3. Tuomet kai N95 kaukė yra vietoje, užtraukite dirželius už ausies. Sureguliuokite dirželius taip, kad būtų kuo patogiau dėvėti.

4. Abiem rankomis suformuokite spaustuką ant nosies, stumdami žemyn ir į išorę, užspauskite spaustuką. Nosies spaustuko formavimas tik viena ranka gali sugadinti kaukę.



5. Patikrinkite, ar tinkamai dėvite kaukę. Laikykite kaukę abiem rankomis ir ramiai kvėpuokite. Oras neturėtų patekti iš po kaukės kraštų.

